

不快感
違和感

せん妄
認知症

テープ
固定

移動時
移乗時

体動

etc



抜去リスクに
ダブル
の固定力

安全。それがみんなの願い。
安全を追求した
今までにない固定テープ

特殊な形状、粘着技術で抜去リスクを軽減。
2枚のテープがチューブを上下から
包み込む形状で多種多様なチューブ類を
しっかり固定します。


医療安全対策におすすめします



プレカットタイプで
テープカット作業を軽減
抜けにくさを追求した
新たな固定テープ



チューブ・ドレーン類固定補助テープ
ミゼアセーフ™W
MM0002
75mm × 75mm
50枚

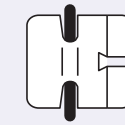

全方向からの「引っ張られる力」をクロス貼りでロック

姉妹品



チューブ・ドレーン類固定補助テープ
ミゼアセーフ™X
MM0001
70mm × 85mm
50枚



使用上の注意

- 傷口に直接貼らないでください。
- カテーテルに常に負荷がかからないようにしてください。
- 本品使用中に皮膚障害の症状が生じた場合は、使用を中止するなど、適切に対処してください。
- 本製品はチューブ類を固定する用途の製品です。無理な剥離により皮膚を損傷する恐れがありますのでご注意ください。
- 著しく乾燥している又水にぬれた肌、高温多湿環境では固定性が確保できない場合があります。

お問い合わせは

●製品についてのお問い合わせは
TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679
●このカタログの内容は 2021 年 10 月現在のもです。

Nitto 株式会社ニトムズ

本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階
東京事業所 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階
大阪営業所 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト15階
仙台営業所 〒980-6014 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 SS3014階
福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル4階
豊橋事業所 〒441-3104 愛知県豊橋市雲谷町字ハシヅメ11-6
松山事業所 〒799-2425 愛媛県松山市中西外1057-1
<https://www.nitoms.com/>

●ニトムズは、日東電工株式会社（Nitto）のグループ企業です。



ISO 9001・ISO 14001
ISO 45001
豊橋事業所
松山事業所

EF 21-10 (EF-001)

Nitto

Innovation for Customers

ミゼンにアンゼンをめざして

チューブ・ドレーン類固定補助テープ

ミゼアセーフ™W





ダブル
の固定力

強さと優しさを実現した
新たな固定テープ

株式会社ニトムズ


“未然に安全”をめざして

上下のテープで多様な太さのチューブ類をしっかりと固定

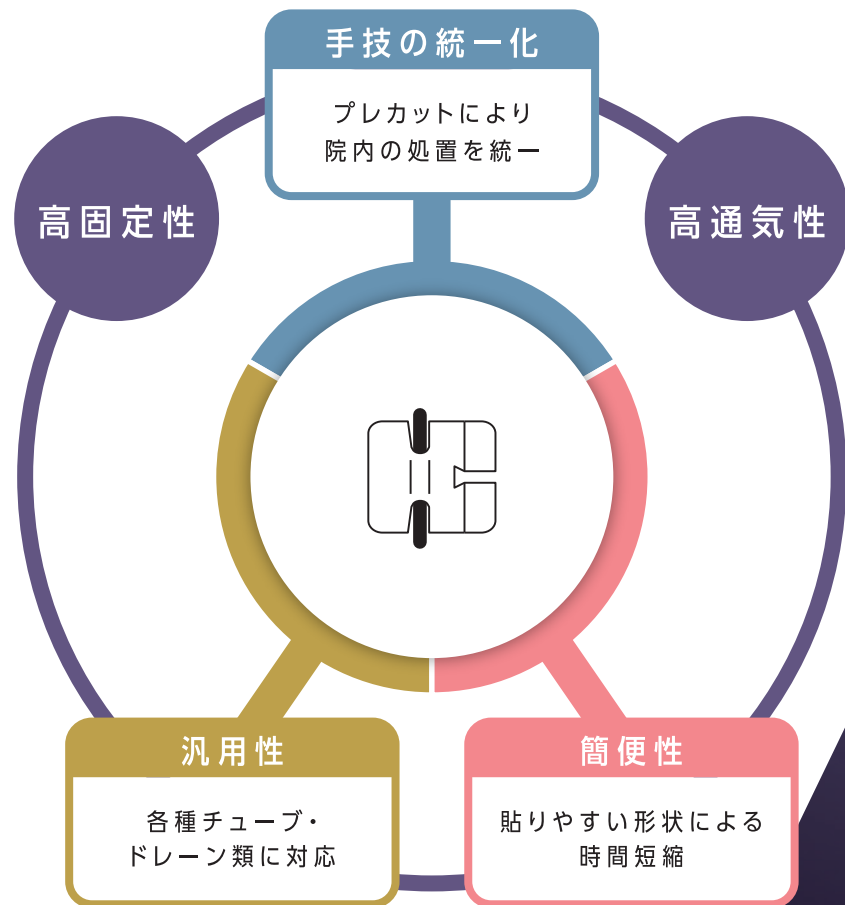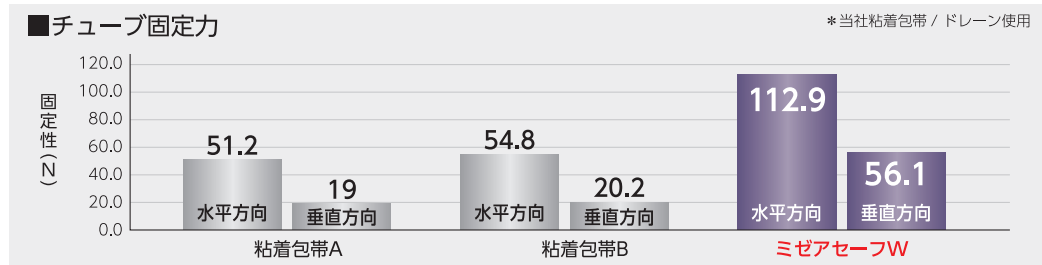

通気性を高める独自のウェーブ塗工™

粘着部分と非粘着部分が交互に波状パターンを形づくる、Nitto独自の粘着技術。高い通気性を確保し、むれやかぶれの要因を軽減します。

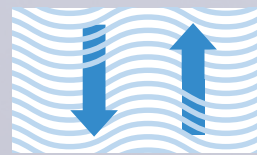


ウェーブ塗工™



はがしやすい形状(ノッチ)


使用後のチューブを取り出しやすくする為の形状です。

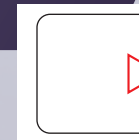

端部結合による自然な重なり

上層部と下層部二枚が自然に重なり合い一体化します。下層部が下地となりチューブと皮膚が直接接触しません。


縦方向に対する力を逃す幅広スリット

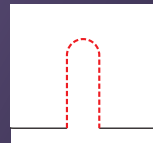

チューブの滑り・ズレを防ぐ両面テープ

重ね貼りに強い不織布+両面テープ。滑り・ズレを防止します。

補強箇所に貼り付けできる補強テープ(2枚)

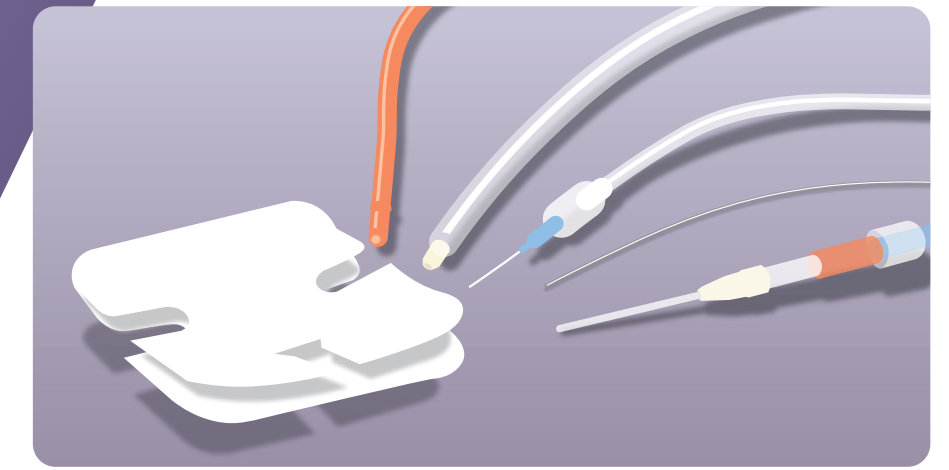

用途

多様なチューブ・ドレーン類をより安全に固定

末梢静脈カテーテル

透析用血液回路

中心静脈カテーテル(CV)

尿道・膀胱留置カテーテル

末梢型中心静脈カテーテル(PICC)

胸腔ドレーン等


皮下埋め込み型ポート(CVポート)

硬膜外カテーテル

動脈カテーテル(Aライン)


その他

〈様々な太さのチューブに対応〉

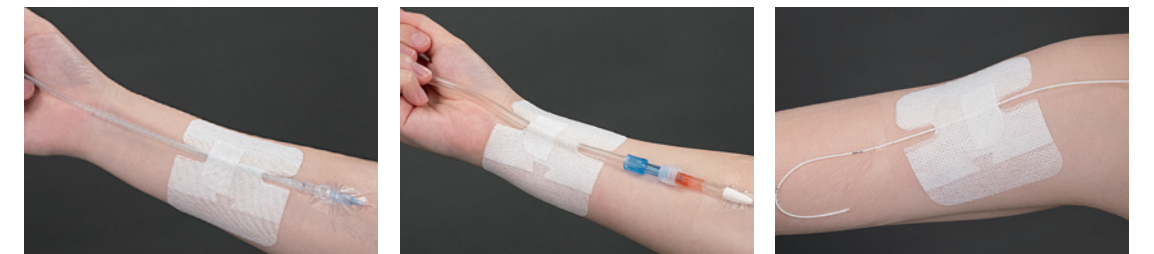


ご使用方法


動画でもご覧いただけます

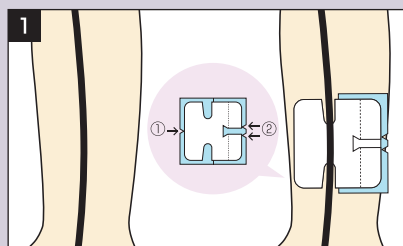


はくり紙①をはがして(スリット中央部に)チューブが来るように潜り込ませて貼ります。

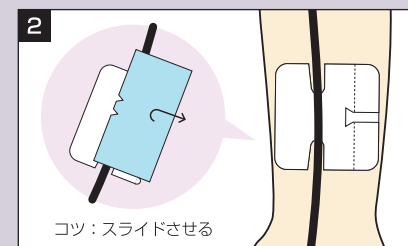


はくり紙②をはがしながら(スライドさせながら)下層部全体を貼り付けます。

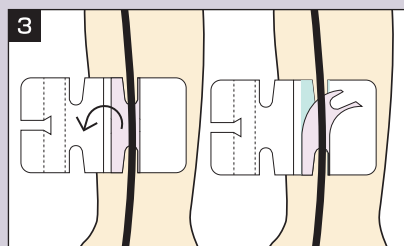


上層部を開いた後、少しテープを浮かせながら両面テープのはくり紙をはがします。

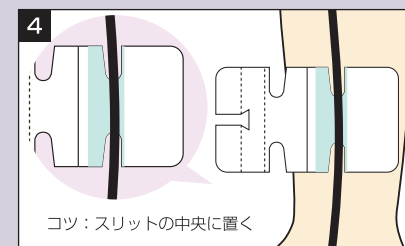


スリット部の中央にチューブを置きます。
※両面テープの中央ではありません。

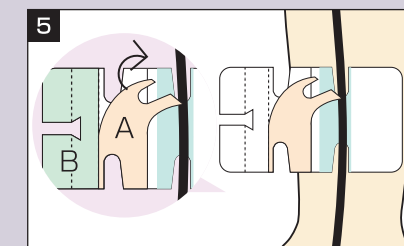


上層部のはくり紙の中央部からはくり紙 A を矢印方向にはがしチューブを覆っていきます。
※実際のはくり紙にはA・B表記はありません。

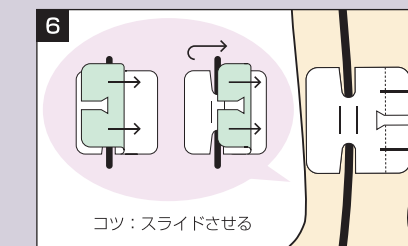

Bのはくり紙をはがしながらスライドさせ、下層部全体に重ねて貼ります。*その時テープの一部がミシン目で分離されはくり紙に補助テープとして残ります。

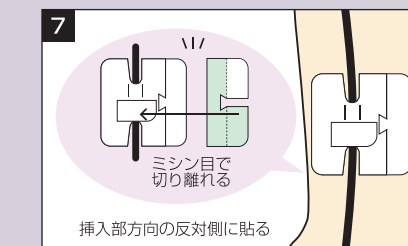

上層部はくり紙についている補強用テープを貼ります。テープ全体をなじませて密着固定させてください。*補強用テープは2枚あります。もう片方は必要な箇所(強化させたい場所)にご使用ください。

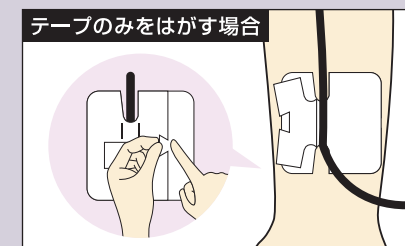

凹部の角から上層部をはがしチューブを露出させます。露出したチューブを取り出します。

*各グラフの数値は弊社データで保証値ではありません。