




メドライン コンタクトレイヤー

ARTEMESH

アルテメッシュ

ぴたっと貼れて優しくはがせる、
しなやかなメッシュが創面を保護

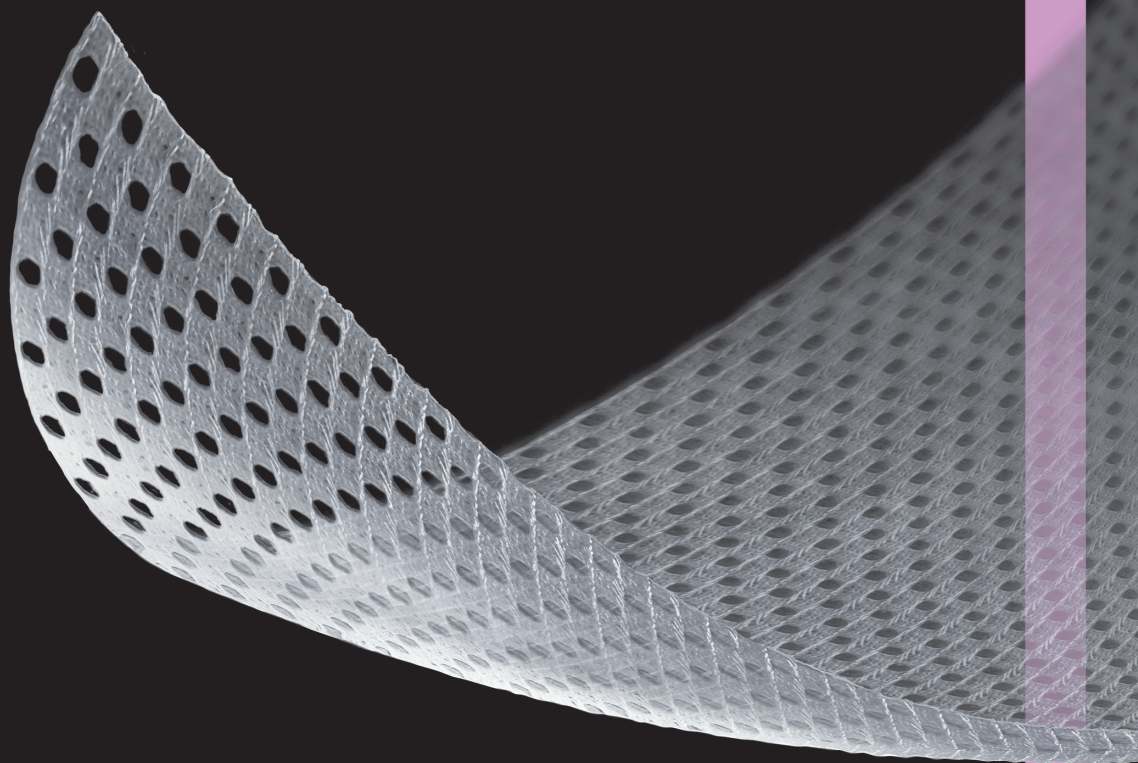

株式会社ニトムズ

創部をまもる優しい貼り心地。 様々な部位にフィットするコンタクトレイヤー。


メドライン コンタクトレイヤー

ARTEMESH アルテメッシュ


- 術後創傷の被覆・保護を
目的とした創傷被覆材です。
- シリコンゲル層は密着性を有し、
操作性及び貼り付け時の
患部密着性を向上させます。




貼付方法

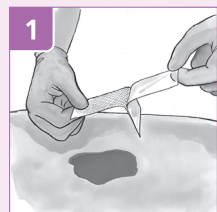

傷の周りを清拭し乾かします。本品のセパレータをゲル面に手が触れないように剥がします。

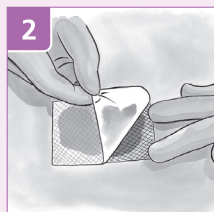

創傷表面に本品を貼付し、上部のセパレータを静かに取り外します。

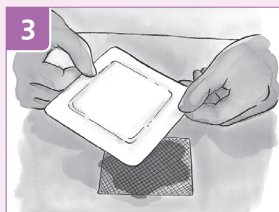

その上をフォームドレッシングのように、適切な吸収性のある滅菌済ガーゼ等で覆って下さい(二次ドレッシング)。その後、粘着テープや包帯等の適当な手段で固定します。

品番	サイズ (cm)	入数/ 化粧箱	価格 (税込)	入数/ 外箱
MSCJ1722	5.1×5.1	10枚	¥1,320	60箱
MSCJ1734	7.6×10.2	10枚	¥2,200	60箱
MSCJ1745	10.2×12.7	10枚	¥3,190	40箱
MSCJ1747	10.2×17.8	10枚	¥3,960	30箱
MSCJ17812	20.3×30.5	10枚	¥15,400	30箱

【使用目的又は効果】 本品は、術後創傷のために用いる被覆・保護材である。

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止 2. 再滅菌禁止

使用上のご注意

●詳細については添付文書をご参照ください。

一般医療機器 手術用被覆・保護材
(救急絆創膏/熱傷被覆・保護材)

届出番号 13B1X00062AWC002

製造販売業者：メドライン・ジャパン合同会社

Nitto 株式会社ニトムズ

※ニトムズは、日東電工株式会社 (Nitto) のグループ企業です。

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階
東京営業所 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階
大阪営業所 〒541-0042 大阪市中央区今橋 3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト15階
仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-1-23 仙台Kビル
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-6 第三博多成成ビル
豊橋事業所 〒441-3104 豊橋市雲谷町字ハシヅメ11-6
松山事業所 〒799-2425 愛媛県松山市中西外 1057-1

●ニトムズのホームページ <https://www.nitoms.com/>

●お問い合わせは

TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679

●このカタログの内容は 2020 年 11 月現在のものです。



PAC21-03050 (EF-011)